


アプリ説明：基礎脳波検出 (v1.1)

- 01：脳波の信号がリアルタイムで表示できるアプリです。グラフは集中度、リラククス度と元の脳波信号を周波数分解した、 δ 波、 θ 波、低 α 波、高 α 波、低 β 波、高 β 波、低 γ 波、高 γ 波が表示されます。
- 02：初期画面で今回の記録の名前をつけます。(日付等のメモ情報)
- 03：テスト開始のタップでグラフ表示が始まります。
- 04：各信号がリアルタイムで棒グラフで表示されます。下のアイコンで中断、停止が選べます。
- 05：左下の設定アイコンで各グラフの表示・非表示が設定でき、見やすくなります。

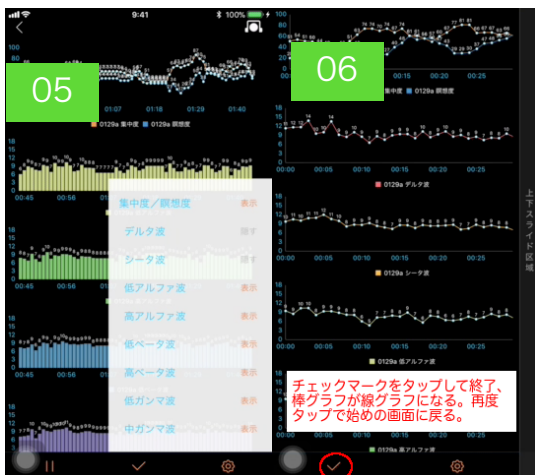

- 06：チェックマークタップで停止し棒グラフから線グラフへ変換され、再度タップで初期画面に戻ります。
- 07：最初の画面のメニューで過去の記録が見れます。
- 08：見たい記録をタップし、検索表示をタップします。
- 09：見たい記録を2つ選ばば、比較表示できます。
- 10：記録の消去は、左スライドで消去をタップします。

